



1

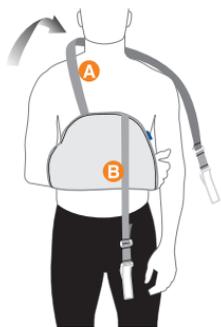

2

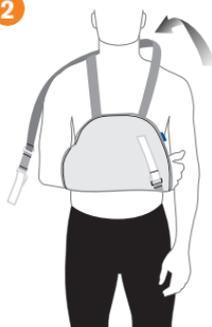


3



4



5

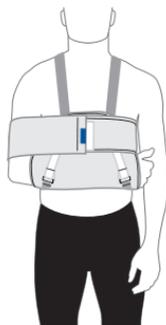

6



Coloque el brazo a inmovilizar en el cabestrillo y posicione éste contra el cuerpo.

1- Tome la correa **A** hacia arriba y sobre los hombros del paciente cruzando por la espalda hacia el lado contrario.

2- Pegue la correa **A** en la zona frontal del cabestrillo con el Velcro® del extremo y ajústela.

3- Repita la misma acción con la correa **B**.

4- Ambas correas deben quedar cruzadas contra la espalda del paciente y sujetas en la zona frontal del cabestrillo.

5- Asegure el brazo a inmovilizar contra el cuerpo con la faja de sujeción. Coloque un extremo de la faja en la zona frontal del cabestrillo, pásela alrededor de la espalda pasando por debajo del otro brazo y asegúrela con Velcro®.