
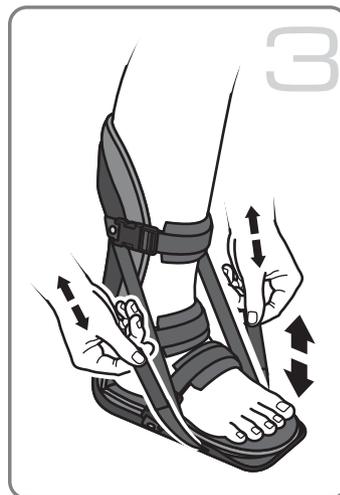
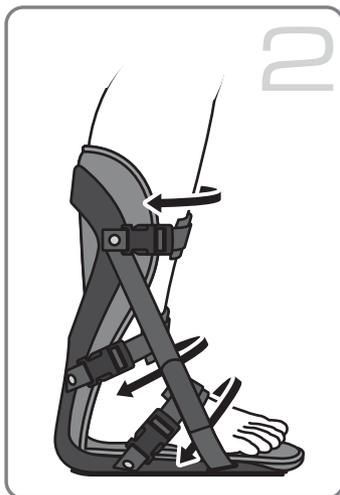


## INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

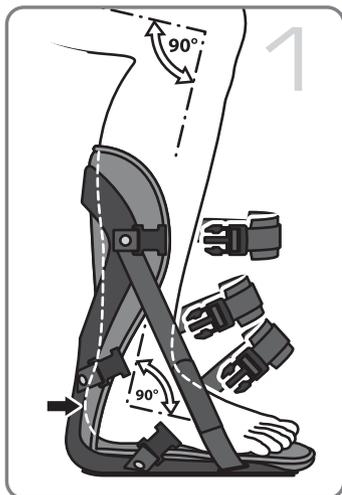

Abra las 3 hebillas.  
Coloque el pie afectado  
en la férula con la rodilla  
flexionada a 90°.  
El talón debe estar en la parte  
posterior de la férula y los dedos  
de los pies no deben extenderse  
más allá del extremo de la férula.  
El tobillo debe estar a 90°  
cuando la férula está colocada  
apropiadamente.

Sujete las hebillas.  
Si es necesario,  
ajuste las hebillas para  
asegurar un ajuste seguro  
y cómodo.

Suelte las correas del gancho  
y del lazo en cada lado  
de la cama del pie.  
Tire hacia arriba o baje las  
correas para ajustar el  
estiramiento de la fascia plantar.

Para lograr un estiramiento  
adicional, tire de la parte  
delantera del revestimiento de  
la placa del pie e inserte la cuña  
de espuma de 5° entre el  
revestimiento y la placa del pie.

**Instrucciones de lavado:** Retirar el revestimiento de la base de la férula y lavar a mano  
con agua tibia usando un detergente suave. Secar al aire.