

### FAJA PORTA BOLSA DE HIELO & AGUA CALIENTE

- 1** Destape la bolsa de hielo e introdúzcala dentro de la faja por la parte posterior de la misma.
- 2** Por la zona frontal de la faja, a través del orificio, extraiga la rosca de la Bolsa de Hielo & Agua Caliente.
- 3** Llene la Bolsa de Hielo & Agua Caliente hasta 3/4 de su capacidad.
- 4** Cierre la Bolsa de Hielo & Agua Caliente con su tapa para evitar filtraciones.
- 5** Coloque la faja con la Bolsa de Hielo & Agua Caliente [BC2008] alrededor de la zona afectada, ajustando la faja por medio de los elásticos con velcro.




### FAJA PORTA BODY CARE GEL

- A** Introduzca el Body Care Gel dentro de la faja por la parte posterior.
- B** Coloque la faja con el Body Care Gel alrededor de la zona afectada, ajustando la faja por medio de los elásticos con velcro.



[ BC2005 ]

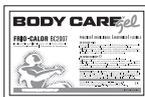

[ BC2007 ]



[ BC2030 ]

