



INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN - BC1064

SOPORTE DE CLAVICULA


BODY CARE
HEALTH & TECHNOLOGY

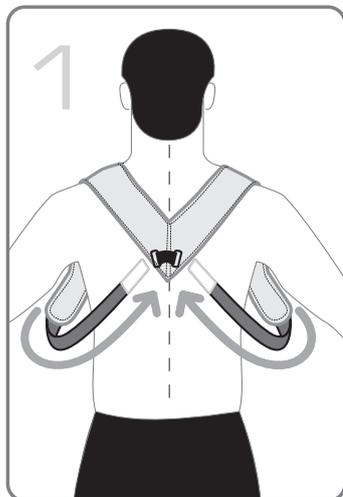


1
Posicione el Soporte de Clavicula centrado en la espalda del paciente. Los anillos D deben descansar lejos del cuello del paciente.

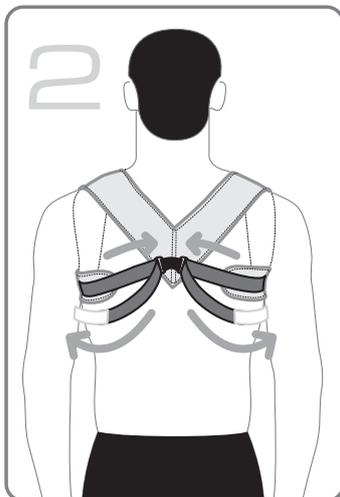

2
Posicione las correas alrededor de la parte superior de los hombros del paciente y envuelvas por bajo de las axilas. Pase las correas laterales a través de los anillos en D

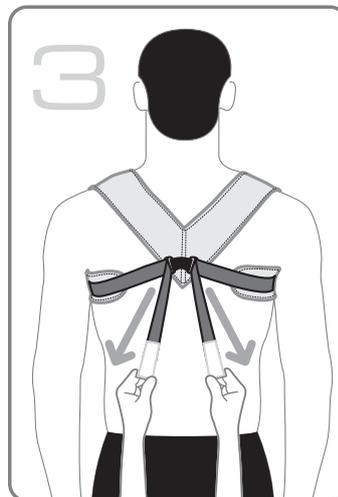

3
Ajuste las correas, para tirar los hombros hacia atrás

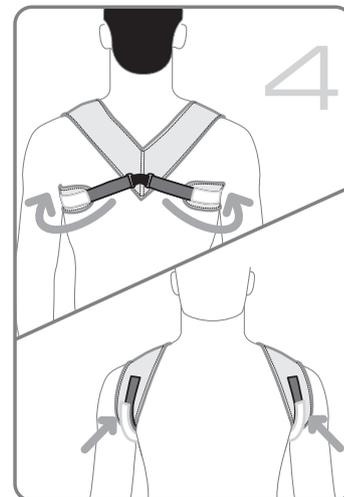

4
Sujete las correas mediante los velcros sobre las correas, hacia el frente del Soporte de Clavicula.