




Asegure la faja inmovilizadora **D** alrededor del área del pecho, con la parte más ancha por debajo del brazo que va a ser inmovilizado.

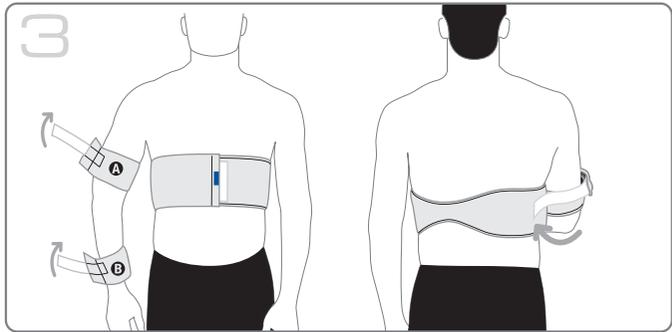

Coloque el brazaletes para el húmero **A** y el brazaletes para la muñeca/mano **B**. Fije el brazaletes para el húmero en la parte posterior de la faja inmovilizadora, asegurándolo con el Velcro.

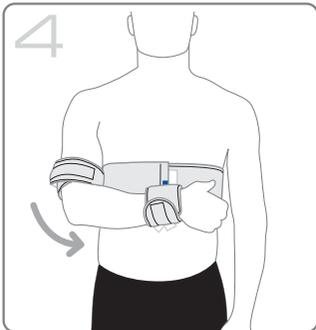

Ubique el brazo en el ángulo deseado (90°) y fije el brazaletes muñeca/mano al frente de la faja inmovilizadora mediante el Velcro.

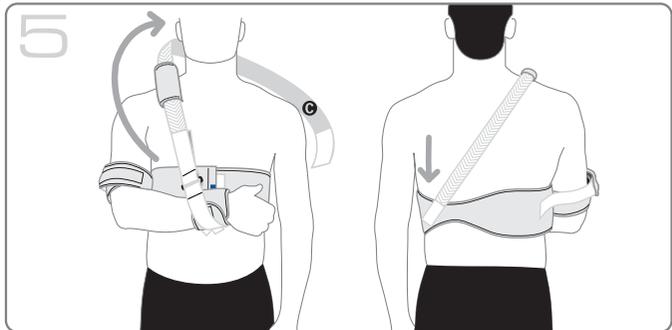

Aplice la correa ajustable para el hombro **C** y fjela con el velcro sobre el brazaletes para la muñeca/mano. Luego, pansando por encima del hombro afectado, asegúrela con la extensión de velcro sobre la parte posterior de la faja inmovilizadora, en la zona del hombro no afectado.