


BC1454 - BODYWALKER



INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

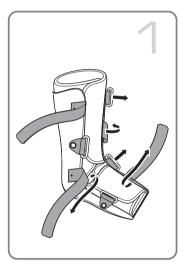


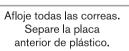

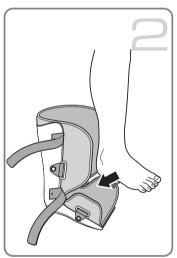


Abra los collarines de espuma.

Meta el pie en la bota
de espuma de forma que el
talón se asiente correctamente
contra la parte posterior de
la bota. Asegúrese de que
el pie quede plano
sobre la plantilla.

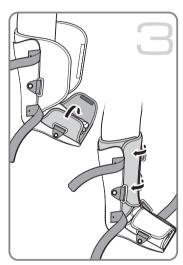

Ajuste la bota superponiendo los collarines de espuma. Fíjelos con los Velcros® cuando consiga el ajuste deseado.

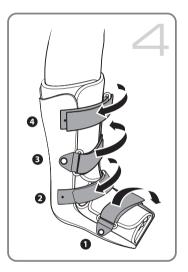

Asegure las tiras de Velcro®, empezando con la correa de la parte inferior de la bota (1).
Introduzca el extremo de la correa a través del anillo negro en forma de D y tire para conseguir la tensión deseada en la correa.
Continúe en forma ascendente con el resto de las tiras.