


SOPORTE PARA CALZADOS CON CORDÓN



1
Retirar la pieza plástica del dispositivo.

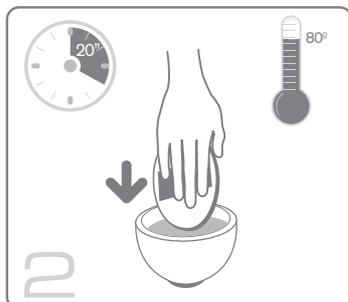

2
Sumergir la pieza plástica en agua caliente a 80°(no hirviendo) durante 20" (veinte segundos) o hasta que se vea completamente transparente.




3
Sobre el empeine colocar un paño fino y sobre él, presionar con la palma de la mano la pieza plástica aún caliente, para que tome la forma del empeine.




4
Una vez que la pieza plástica se enfríe y se endurezca, volver a colocarla en el dispositivo.


SOPORTE PARA CALZADOS SIN CORDÓN

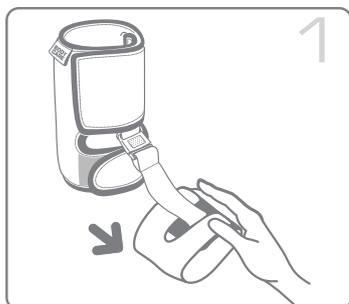


1
Desprenda la cinta para retirar la banda de neoprene del dispositivo.

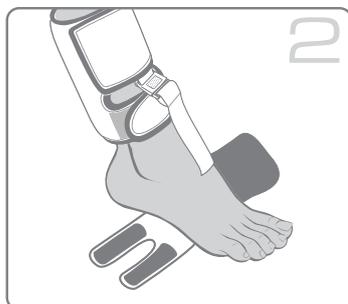

2
Extienda la banda de neoprene por debajo del pie a la altura del arco.

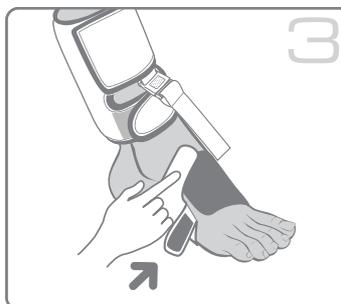

3
Cierre una a una las lengüetas, de manera tal que cubra la totalidad del empeine.

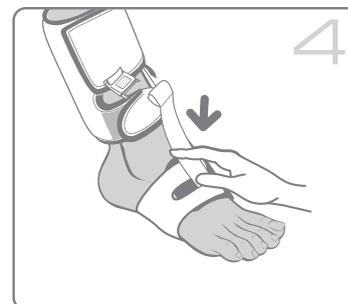

4
Unir la banda de neoprene al dispositivo enganchando la cinta con velcro.